


Mode d'emploi

AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

AVISO Bee Vib récepteur avec vibreur et affichage LED, avec clip.

Il est alimenté par un accumulateur interne.

Condition d'usage: Il faut au moins un AVISO Bee émetteur et un Flash (récepteur/réémetteur) déjà installé.

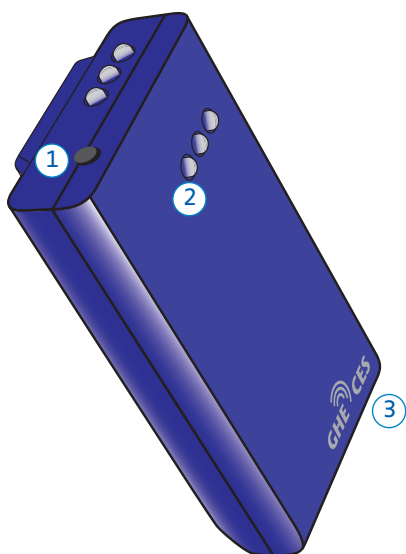

Chargeur (photo peut différer)

1 Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la petite fiche dans la prise (3) en bas de l'AVISO Bee Vib avant la première utilisation (min. 3 heures). La LED rouge (2) brille en continuité.

- L'AVISO Bee Vib est complètement chargé quand la LED rouge commence à clignoter. Chargé totalement, AVISO Bee Vib marche plusieurs jours, en fonction de la fréquence des signaux affichés.

Note: pendant que le Vib est connecté au chargeur, la vibration est coupée.

2 Mise en Service

Pressez le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (2) s'allument. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi enclenché. La LED verte s'allume, puis la LED jaune clignote 1 à 4 fois. Si, après la LED verte, la LED rouge clignote 5 fois (au lieu de la LED jaune), la connection avec un Flash n'a pas pu s'établir. Le Vib se déclenche soi-même. Remettez-le en service plus près d'un Flash. En service, la LED verte clignote toutes les 10 secondes.

3 Déclencher

Tenez presser le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (2) s'éteignent. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi hors service. Nous recommandons de toujours recharger l'appareil après usage.

4 Accumulateur bientôt déchargé

Quand l'accumulateur devient bientôt vide, la LED jaune clignote toutes les 10 secondes (au lieu de la LED verte).

5 Affichage des appels

	rouge	jaune	vert	vibration
Port			●	1x
Téléphon	●			4x
Baby		●		2x
VITAB	●	●		4x